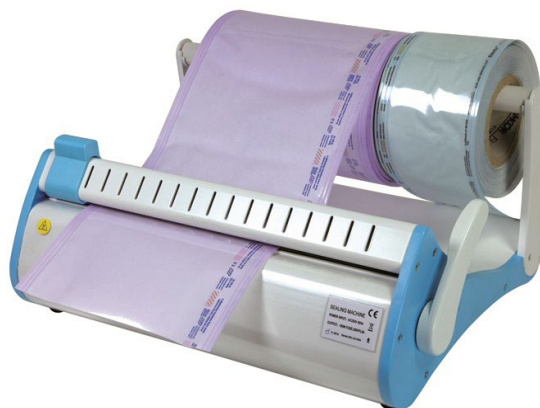


**MESTRA®**

FICHA TECNICA

Referencia:	Ref. 080433	Foto: 
Denominación:	SELLADORA DE BOLSAS	
Normativa:	 2014/35/UE (BT) 2014/30/UE (CEM)	
	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA	
Uso previsto:	Termosellado de bolsas para la esterilización por vapor de artículos en autoclave. La máquina permite cortar a la medida necesaria un trozo permite ablandar por calentamiento una lámina de material plástico, que posteriormente copia la forma del modelo dental en escayola mediante la acción de un ventilador.	
Características técnicas:		
Altura:	210 mm	
Ancho:	430 mm	
Fondo:	335 mm	
Tensión:	230 V, 50/60 Hz	
Potencia:	100 W	
Peso:	6,5 kg	
Anchura de sellado:	12 mm	
Longitud de sellado:	305 mm	
Medidas de seguridad:	▪ Asegúrese de que la tensión de conexión a la red es la adecuada (230 V, 50/60 Hz con toma de tierra). ▪ No utilice el aparato en locales especialmente húmedos, o cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.). ▪ Tenga cuidado de no tocar la resistencia de caldeo (situado debajo del brazo basculante) cuando el aparato se encuentre conectado a la red. ▪ Después de desconectar el interruptor, espere al menos 15 minutos antes de tocar la resistencia de caldeo. ▪ El piloto verde encendido no es indicativo de que el aparato se encuentre a temperatura ambiente. ▪ Evite que los niños o personal no especializado manipulen el aparato. ▪ Evite traccionar, torsionar o plegar en exceso el cable de conexión a la red. ▪ Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que se encuentra desconectado de la red, y que la resistencia ha alcanzado la temperatura ambiente. ▪ Asegúrese de que la tensión de conexión a la red es la adecuada (230 V, 50/60 Hz con toma de tierra).	

	▪ No utilice el aparato en locales especialmente húmedos, o cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.). ▪ Tenga cuidado de no tocar la resistencia de caldeo (situado debajo del brazo basculante) cuando el aparato se encuentre conectado a la red. ▪ Después de desconectar el interruptor, espere al menos 15 minutos antes de tocar la resistencia de caldeo.
Mantenimiento	Para conseguir un adecuado funcionamiento y unas óptimas prestaciones de la selladora le recomendamos: ▪ Utilice siempre rollos de calidad reconocida. Talleres Mestraitua, S.L. recomienda el empleo de rollos-bolsa MESTRA Ref. 080440 con indicador de esterilización. ▪ Mantenga siempre limpia la superficie de sellado. La acumulación de residuos sobre la superficie de sellado reducirá la vida útil de la resistencia y del material aislante. Para una limpieza efectiva desconecte la máquina, espere a que la superficie de sellado se enfríe y use un paño ligeramente humedecido con alcohol. ▪ Periódicamente realice una limpieza del aparato. Para ello, desconéctelo de la red y emplee un paño. ▪ Para garantizar un correcto sellado espere siempre a que el piloto esté rojo. ▪ Apague la selladora siempre que no la esté utilizando. ▪ No deje el brazo bajado sin vigilancia. ▪ Si fuera necesario cambiar el fusible, use solo fusibles con las mismas especificaciones que el original. ▪ Cuando empaquete instrumentos con piezas punzantes o cortantes, protéjalos con algodón o gasas para evitar que la bolsa se rompa. ▪ Siga las instrucciones del fabricante de su autoclave para una correcta esterilización. ▪ Desconecte el cable de alimentación para cualquier operación de mantenimiento de la selladora.